

**1. KOKOA**

Volumatic koostuu kahdesta osasta. Kokoa Volumatic painamalla puoliskot kiinni toisiinsa kohdistusmerkkien mukaisesti.



**2. TARKISTA**

Varmista aina ensimmäiseksi, että lääkettä on jäljellä. Osassa Evohalereista on annoslaskuri, josta jäljellä olevien lääkeannosten määrä on helppo laskea. Mikäli Evohalerissasi ei ole annoslaskuria, kirjaa ylös lääkkeen aloittamispäivä. Tämä helpottaa seuranta jäljellä olevista lääkeannoksista. Yhdessä Evohalerissa on joko 120 tai 200 annosta.



**3. RAVISTA**

Poista inhalaatiosumutteen suukappaleen suojus puristamalla sitä kevyesti molemmilta sivuilta. Ravista Evohaleria kunnolla. Mikäli laite on sinulle uusi tai et ole käyttänyt sitä useisiin viikkoihin, varmista toimivuus: pidä Evohaleria pystysuorassa peukalon ja etusormen välissä ja paina metallisiä 2 kertaa vapauttaaksesi 2 annosta.



**4. ANNOSTELE**

Kiinnitä Evohaler paikoilleen Volumatic-tilanjatkeeseen. Vapauta lääkeannos painamalla Evohaleria kerran etusormellasi. Jos lääkäri on määrännyt useamman annoksen inhaloitavaksi, laukaise toinen lääkeannos. Volumaticiin voi laukaista 2 annosta kerrallaan. Etene riipeästi seuraavaan vaiheeseen.



**5. INHALOI**

Hengitä normaalisti ulos. Vie Volumaticin suukappale suuhun ja sulje huulet tiiviisti sen ympärille. Hengitä sisään hitaasti ja syvään suun kautta. Pidätä hengitystä 5-10 sekuntia ennen kuin hengität hitaasti ulos. Jos lääkäri on määrännyt useamman kuin 2 suihketta kerralla, odota ainakin minuutin verran ennen kuin toistat kohdissa 4 - 5 esitetyt toimenpiteet.



Irrota Evohaler tilanjatkeesta ja aseta suukappaleen suojus takaisin Evohaleriin. Muista huuhdella suu lääkkeenoton jälkeen. Puhdista tilanjatke säännöllisin väliajoin.

Lisää tietoa oman sairautesi hoitoon löydät osoitteesta: **HENGITYS.FI**

Kun lääkäri on määrännyt sinulle Evohalerilla annosteltavan lääkkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Tarvittaessa kysy neuvoa lääkäriltäsi, apteekista tai ota yhteyttä GSK:n tuoteinfoon 010 30 30 100.

GSK, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo. puh. 010 3030 30, [www.gsk.fi](http://www.gsk.fi)

10/2016, FIN/RESPI0110/16a